

Calza a trama piatta

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO:

- Classi di compressione 1 - 2 - 2strong - 3 - 4.
- Tessuto resistente all'uso di pomate dermiche, unguenti, ecc.

Taglia:

S	M	L	XL
---	---	---	----

ISTRUZIONI

Nell'indossare la calza, avere cura di rovesciarla dall'alto fino al tallone, introdurre la calza fino al collo del piede, successivamente accompagnarla fino al polpaccio o coscia (a seconda del modello) e stenderla accuratamente evitando di torcerla. Si raccomanda che l'arto sia asciutto.

AVVERTENZE

Prestare attenzione a unghie ed anelli, possono danneggiare la calza. Si consiglia l'uso di guanti in gomma. Il prodotto non deve essere utilizzato direttamente su ferite aperte e cute lesa. Tenere la calza lontano dalla portata dei bambini (pericolo soffocamento).

MANUTENZIONE

Al fine di preservare la funzionalità elastocompressiva delle calze, si raccomanda di lavarle, soprattutto se si fa uso di creme o unguenti, preferibilmente a mano a circa 30° con sapone neutro, risciacquarle con abbondante acqua tiepida, non strizzarle, asciugarle lontano da fonti di calore, evitare di esporle alla luce diretta del sole, non stirarle.

Essendo questo articolo considerato Dispositivo Medico di Classe I l'utilizzatore è tenuto a seguire scrupolosamente le istruzioni di utilizzo e le avvertenze riportate. L'azienda non si rende responsabile di eventuali danni a persone o cose in caso di uso improprio dell'articolo contenuto in questa confezione.



DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I non sterile



Composizioni
76% poliammide
24% elastam



Flebysan[®]
indossa il benessere

Made in Italy
Prodotto e distribuito da:
New Medical Service s.r.l.
Via San Sisto, 15/a
45100 Rovigo (ITALIA)
www.flebysan.it



CND M030405



Flebysan[®]
indossa il benessere

LINEA TUTORI A TRAMA PIATTA

